


安全で使いやすい浴室手すり

握りやすい形状の手すり






■ 握りやすい楕円手すり形状

手すりはしっかりと握りやすい楕円形状を採用しています。手すり表面は冷たくなくソフトな感触の軟質樹脂を採用しています。

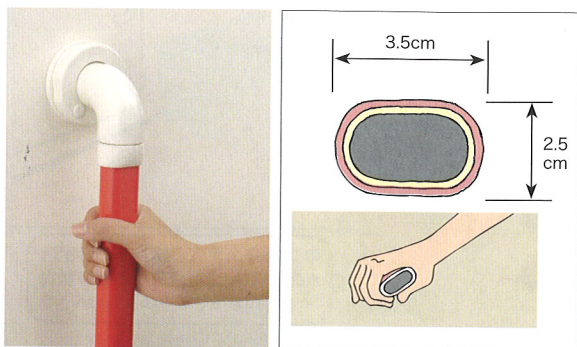



■ 握りやすい角度に手すりを調節

手すりの設置場所や動作に応じて、握りやすい最適な角度に、調節することができます。

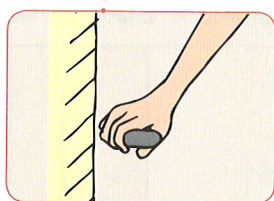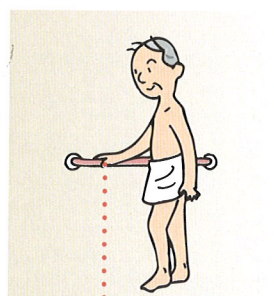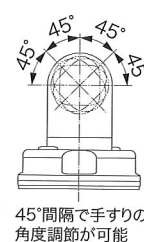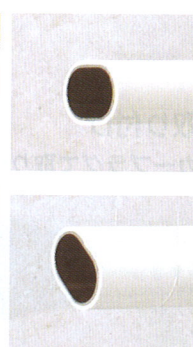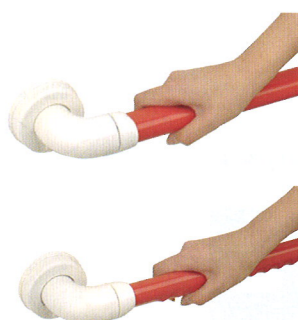



I型横手すりの場合

上面に平坦な部分がくるように設置すると手をついて歩行しやすくなります。

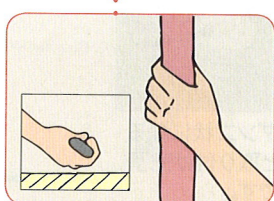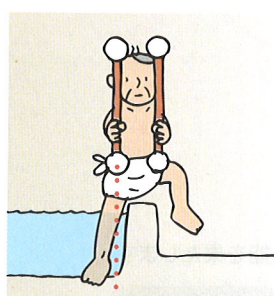


I型縦手すりの場合

持ちやすい方向へ平坦な部分を傾けると手すりをしっかり握れます。

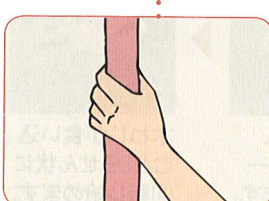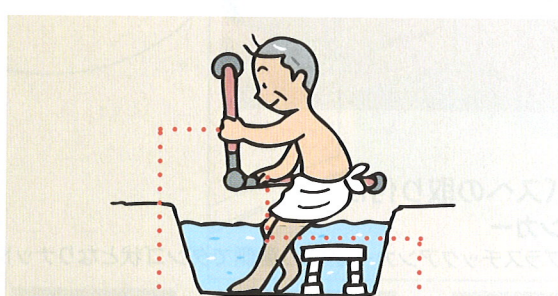

L型手すりの場合

縦手すりは持ちやすい方向へ、横手すりは上面に平坦な部分がくるように設置すると立ち上がり動作が行いやすくなります。

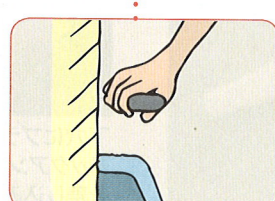

取り付け後に握る角度を変更できます。


●I型手すりの場合



回り止めピンを外し、取り付けカバーを回して取り外します。



手すりとはエルボを固定しているネジを取り外します。

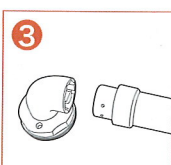

手すりの角度を再調節します。

●L型手すりの場合



回り止めピンを外し、取り付けカバーを回して取り外します。軸受けは目隠しキャップを外し、中のネジを取り外します。



L型の手すりを取り外し、手すりとはエルボ・軸受けを固定しているネジを取り外します。



手すりの角度を再調節します。


Bath room

セーフティバー

屋内（浴室）


■ すべりにくいディンプル形状

手すり裏側には手にしっかりフィットして握りやすく、手がすべりにくいディンプル加工（凹凸加工）を採用しています。

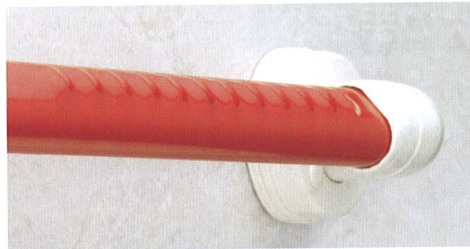

■ 一般浴室への取り付け

付属のネジと、アンカープラグで取り付けます。

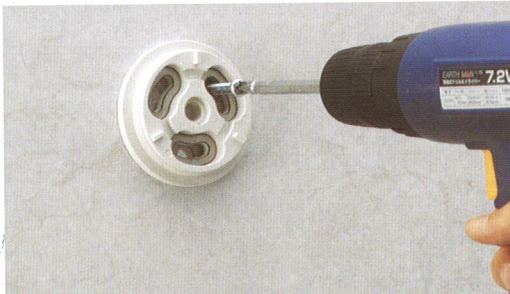

■ ユニットバスへの取り付け

プラスチックアンカー

当社独自形状のプラスチックアンカーが壁の裏側でダンゴ状となりナットの機能を果たします。



下穴にプラスチックアンカーを差し込みます。



木ねじが食い込むと、らせん状に回転し始めます。



ダンゴ状になると取り付け完了です。

※壁裏の状況

取り付け可能なユニットバスの壁

- 壁の厚さ: 4～12mm
- 壁の種類

ご注意

下記のユニットバス壁には取り付けできません。

- タイル
- 塩ビ鋼板複合
- 化粧鋼板
- FRP

- 天然大理石（壁の強度が不足しているため）
- 天然木（壁の強度が不足しているため）
- ホーロー（壁の強度が不足しているため）
- 特殊化粧セメント板（5mm）（壁の強度が不足しているため）

現場にあわせて自由自在 ～部材施工～

■ 部材を組み合わせて現場施工

手すりの長さを調節
アルミパイプ
なので楽々切断

部材を組み合わせて取り付けできます！

精度手すり2000
(ディンプル無し)

エンドエルボ

L型エルボ

利用者の日常動作を考えると、この位置に手すりを付けたいけど、ちょうどいい長さの手すりがないなあ～

利用者にあわせた手すりの設置ができて大満足！！

■ 選べる手すりの色

5色のカラーバリエーション

ベージュ アイボリー ブラウン

レッド ホワイト

・浴室に後付け手すりを付けると既設手すりとは色があわないからおかしいし…
・利用者さんから、今付いている手すりに色を合わせたって言われたけど…
・ちょうどいい色の手すりが無いなあ～

手すりの色を選べると浴室に合う設置ができて大満足！！

Bath room


セーフティバー

屋内 (浴室)

エンドエルボ



ホワイト

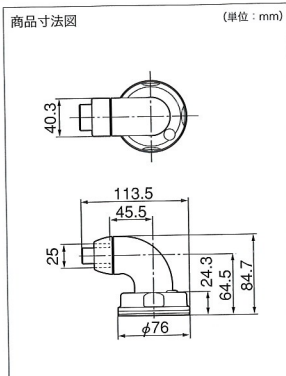

材質: PP
梱包入数: 30個(UBは1個)
出荷単位: 1個

付属品: 止水シート×1/アンカープラグ×3/取付ネジ(5×50mm)×3
手すり固定ネジ(4×19mm)×1/エルボ固定ネジ(4×30mm)×1


※UBタイプのみ
プラスチックアンカー×5/チューブ×3
プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×3/角座金×3/アロンアルファ

品名	色調	商品コード	JAN	価格
エンドエルボ	ホワイト	535-890	473467	4,800円(税込5,040円)
	ベージュ	535-891	473481	
	ブラウン	535-899	473498	
	アイボリー	535-895	473474	
	ホワイト	874-190	473986	
エンドエルボUB	ベージュ	874-191	474006	6,600円(税込6,930円)
	ブラウン	874-199	474013	
	アイボリー	874-195	473993	
	アイボリー	874-195	473993	

L型エルボ



ホワイト

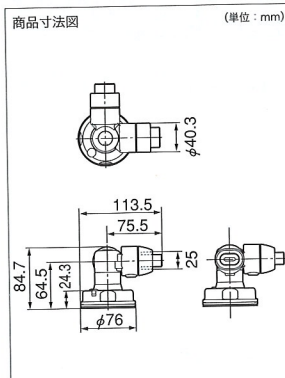

材質: PP
梱包入数: 30個(UBは1個)
出荷単位: 1個

付属品: 止水シート×1/アンカープラグ×3/取付ネジ(5×50mm)×3
手すり固定ネジ(4×19mm)×1/エルボ固定ネジ(4×30mm)×1

※UBタイプのみ
プラスチックアンカー×5/チューブ×3
プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×3/角座金×3/アロンアルファ


品名	色調	商品コード	JAN	価格
L型エルボ	ホワイト	535-800	473504	6,200円(税込6,510円)
	ベージュ	535-801	473528	
	ブラウン	535-809	473535	
	アイボリー	535-805	473511	
	ホワイト	874-200	474020	
L型エルボUB	ベージュ	874-201	474044	8,000円(税込8,400円)
	ブラウン	874-209	474051	
	アイボリー	874-205	474037	
	アイボリー	874-205	474037	

楕円手すり2000



レッド

ホワイト

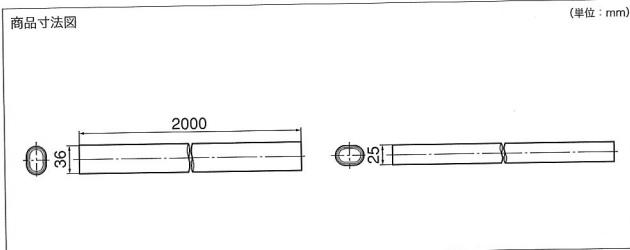


材質: アルミニウム(PVC被覆)
梱包入数: 1本
出荷単位: 1本

品名	色調	商品コード	JAN	価格
楕円手すり2000	ホワイト	535-880	473412	12,000円(税込12,600円)
	レッド	535-887	473429	
	ベージュ	535-881	473443	
	ブラウン	535-889	473450	
	アイボリー	535-885	473436	

カラーバリエーション5色

レッド ホワイト ベージュ アイボリー ブラウン

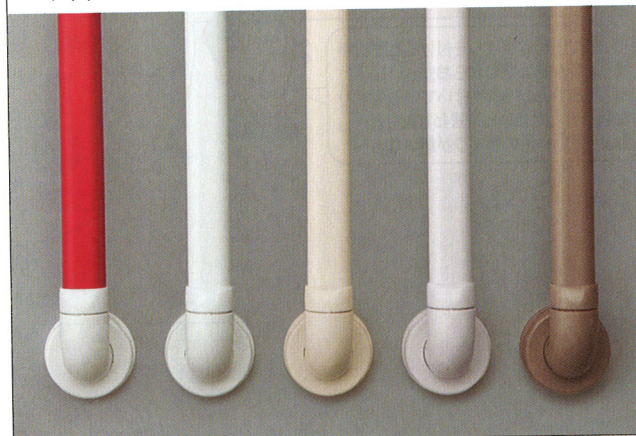

セーフティバー



ホワイト



レッド

材質：(バー本体)ステンレス[PVC被覆]、(台座)PP

梱包入数：1セット

出荷単位：1セット

T A I S : 000257

CCTA 95 : 181803

付属品：止水シート×2/アンカープラグ×6/取付ネジ(5×50mm)×6

エルボ固定ネジ(4×30mm)×2

※UBタイプのみ


プラスチックアンカー×8/チューブ×6

プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×6/角座金×6/アロンアルファ

品名	色調	商品コード	JAN	価格
I-400	ホワイト	535-810	417089	14,000円(税込 14,700円)
	レッド	535-817	417096	
	ベージュ	535-811	473559	
	ブラウン	535-819	473566	
	アイボリー	535-815	473542	
I-400UB-N	ホワイト	874-110	474075	17,500円(税込 18,375円)
	レッド	874-117	474082	
	ベージュ	874-111	473764	
	ブラウン	874-119	473771	
	アイボリー	874-115	473757	
I-500	ホワイト	535-820	417102	14,500円(税込 15,225円)
	レッド	535-827	417119	
	ベージュ	535-821	473580	
	ブラウン	535-829	473597	
	アイボリー	535-825	473573	
I-500UB-N	ホワイト	874-120	474099	18,000円(税込 18,900円)
	レッド	874-127	474105	
	ベージュ	874-121	473795	
	ブラウン	874-129	473801	
	アイボリー	874-125	473788	
I-600	ホワイト	535-830	417126	15,000円(税込 15,750円)
	レッド	535-837	417133	
	ベージュ	535-831	473610	
	ブラウン	535-839	473627	
	アイボリー	535-835	473603	
I-600UB-N	ホワイト	874-130	474112	18,500円(税込 19,425円)
	レッド	874-137	474136	
	ベージュ	874-131	473825	
	ブラウン	874-139	473832	
	アイボリー	874-135	473818	
I-800	ホワイト	535-840	417140	16,500円(税込 17,325円)
	レッド	535-847	417157	
	ベージュ	535-841	473641	
	ブラウン	535-849	473658	
	アイボリー	535-845	473634	
I-800UB-N	ホワイト	874-140	474143	20,500円(税込 21,525円)
	レッド	874-147	474150	
	ベージュ	874-141	473856	
	ブラウン	874-149	473863	
	アイボリー	874-145	473849	

商品寸法図

(単位：mm)

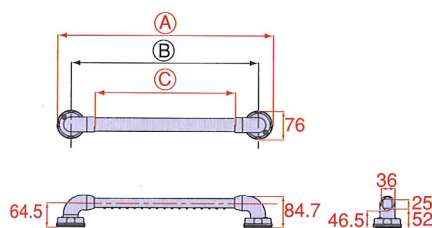

	I-400	I-500	I-600	I-800
①	476.6	576.5	676.5	877
②取付芯	400	500	600	800
③	275	375	475	675
商品重量	約0.6kg	約0.7kg	約0.8kg	約0.9kg

Bath room

セーフティバー

屋内（浴室）

セーフティバー



レッド



ホワイト

材 質：（バー本体）ステンレス〔PVC被覆〕、（台座）PP

梱包入数：1セット

出荷単位：1セット

T A I S：000258

CCTA95：181803

付属品：止水シート×3／アンカープラグ×9／取付ネジ（5×50mm）×9

エルボ固定ネジ（4×30mm）×4


※UBタイプのみ

プラスチックアンカー×11／チューブ×9

プラスチックアンカー用固定ネジ（4.1×50mm）×9／角座金×9／アロンアルファ

品 名	色 調	商品コード	JAN	価 格
L-400×600	ホワイト	535-850	417164	28,500円(税込29,925円)
	レッド	535-857	417171	
	ベージュ	535-851	473672	
	ブラウン	535-859	473689	
	アイボリー	535-855	473665	
L-400×600UB-N	ホワイト	874-150	474167	32,500円(税込34,125円)
	レッド	874-157	474174	
	ベージュ	874-151	473887	
	ブラウン	874-159	473894	
	アイボリー	874-155	473870	
L-600×600	ホワイト	535-860	417188	30,000円(税込31,500円)
	レッド	535-867	417195	
	ベージュ	535-861	473702	
	ブラウン	535-869	473719	
	アイボリー	535-865	473696	
L-600×600UB-N	ホワイト	874-160	474181	33,500円(税込35,175円)
	レッド	874-167	474198	
	ベージュ	874-161	473917	
	ブラウン	874-169	473924	
	アイボリー	874-165	473900	
L-600×700	ホワイト	535-870	417201	31,500円(税込33,075円)
	レッド	535-877	417218	
	ベージュ	535-871	473733	
	ブラウン	535-879	473740	
	アイボリー	535-875	473726	
L-600×700UB-N	ホワイト	874-170	474204	35,500円(税込37,275円)
	レッド	874-177	474211	
	ベージュ	874-171	473948	
	ブラウン	874-179	473955	
	アイボリー	874-175	473931	

角度調節

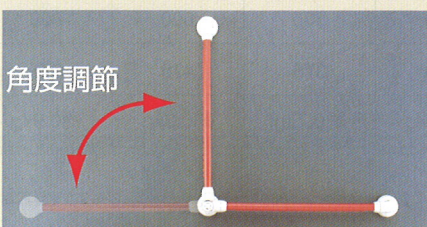


角度調節

垂直手すり部の角度は
90°～180°の範囲で自
在に調節できます。

商品寸法図

(単位：mm)

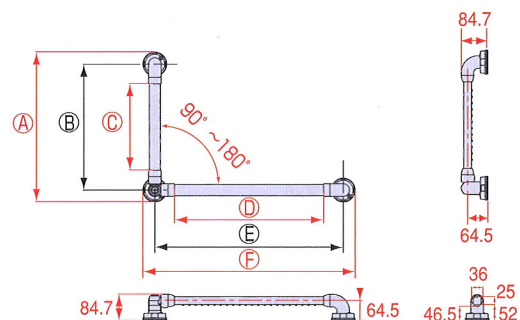

単位：mm

	L-400×600	L-600×600	L-600×700
Ⓐ	476.5	676.5	676.5
Ⓑ	400	600	600
Ⓒ	275	475	475
Ⓓ	475	475	575
Ⓔ	600	600	700
Ⓕ	676.5	676.5	776.5
商品重量	約1.4kg	約1.5kg	約1.6kg

セーフティバーの取り付け方

ユニットバスでも壁を解体せずに取り付けすることができます。

※壁裏に柱のない薄いユニットバスの壁（4～12mm）に取り付けることができます。

壁パネルの条件


注意

●手すりの変色、取り付け強度の低下をさけるため、「高温になる室内や直射日光の当たる場所」「常時水に浸かる場所」「壁表面が平坦ではない場所」には取り付けないでください。


取り付け可能な壁（パネル）	取り付け不可能な壁（パネル）
■タイル ■塩ビ銅板複合 ■化粧銅板 ■FRP	■天然大理石（壁の強度が不足しているため） ■天然木（壁の強度が不足しているため） ■ホーロー（壁の強度が不足しているため） ■特殊化粧セメント板（5mm）（壁の強度が不足しているため）

※取り付け前に壁の材質等を確認し、施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。


取り付け方

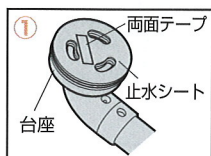


止水シート裏面の両面テープをはがし、手すりを取り付けたい位置に貼り付けます。

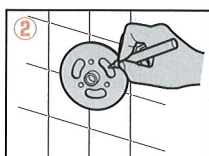


壁に残った止水シートの穴の内側にマーキングします。

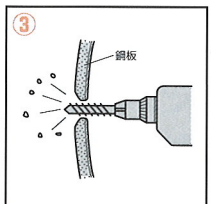


取り付け前の確認 1
下穴を開ける場合は、ドリル先を壁に押しつけないでください。下穴の内側がすり鉢状になり、うまく固定が出来ません。

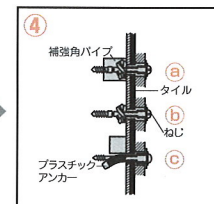


取り付け前の確認 2
④、⑤の場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、⑥の場合はプラスチックアンカーのスリットからねじがはずれ、所定の締め付け強度が得られません。

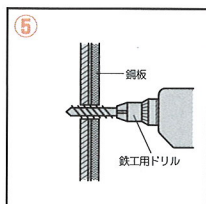


下穴の切削
下穴を鉄工用ドリルで開け、穴内側に木工用アロンアルファを塗った上で、防水のために下穴が完全に隠れるまでコーキング剤を注入します。

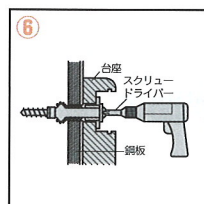


ねじの締め込み 1
下穴にプラスチックアンカーを差し込んだ後、そのねじ穴内部にもコーキング剤を注入し、そこにねじを締め込みます。
※FRPに取り付ける場合は、付属のプラスチックアンカーにゴムチューブを差し込んで施工してください。

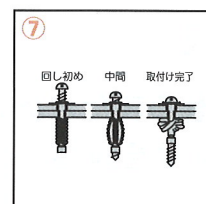


ねじの締め込み 2
ねじを締めるにつれプラスチックアンカーの壁裏部分が広がり、壁を挟み込むように固定します。
※プラスチックアンカーは、専用品のため、市販のものは使用しないでください。

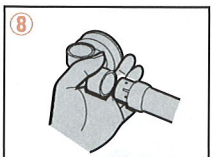

利用者の握りやすい角度に手すりを調節します。

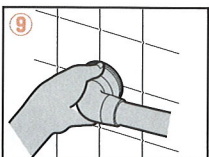

取り付けカバーを固定し手すりを取り付けます。

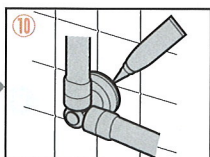

台座のまわりをコーキング剤でシールします。

※市販のコーキング剤を別途準備してください。

※詳しい取り付け方については、製品に付属の施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。

Bath room

セーフティバー


屋内（浴室）

Plan 1


扉の横に縦手すりを設置

浴室の出入りの際の支えとなる縦手すりを設置。

■ 使用した商品

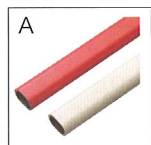

楕円手すり

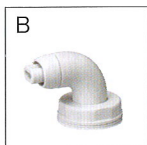

エンドエルボ




Plan 2


浴槽のまたぎ動作補助の手すりを設置

浴槽へ「入る用」と浴槽から「出る用」の縦手すりをそれぞれ設置。


■ 使用した商品

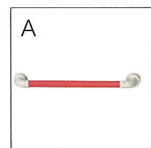

セーフティバー
I-600

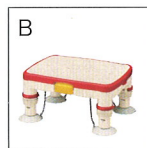

高さ調節付
浴槽台 R

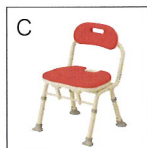

折りたたみ
シャワーベンチ IN-S




Plan 3


浴槽からの立ち上がり補助の手すりを設置

浴槽内から立ち上がるときに、支えとなるL型手すりを設置。
この際、縦手すりをななめに設置すると、より動作が安定します。


■ 使用した商品

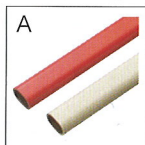


楕円手すり

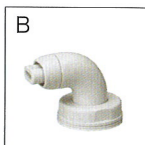


エンドエルボ

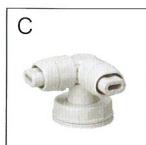

L型エルボ

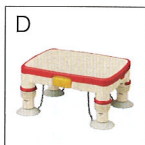

高さ調節付
浴槽台 R

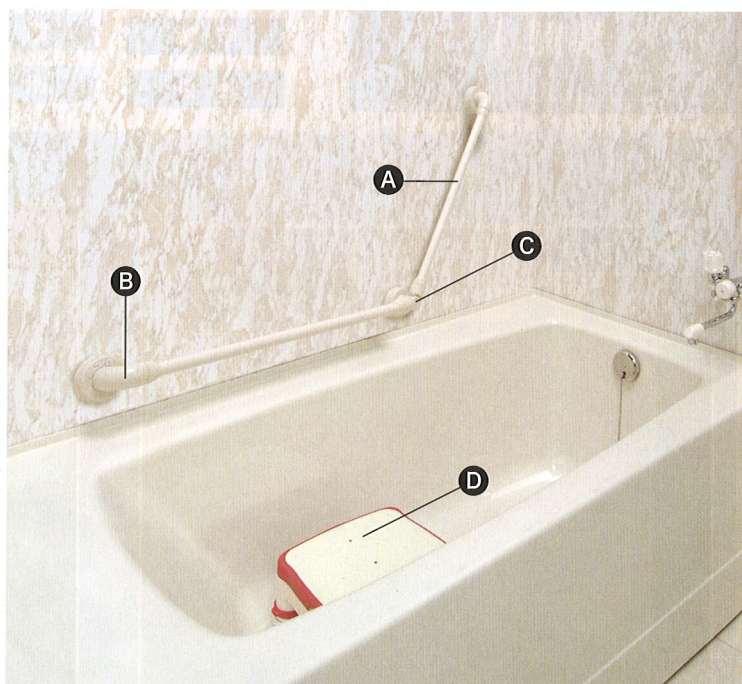


Plan 4

シャワーベンチからの立ち上がり補助の手すりを設置

シャワーベンチから立ち上がる際に支えとなる縦手すりを設置。

■ 使用した商品

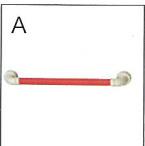

セーフティバー
I-800



折りたたみ
シャワーベンチ IS



Bath room

台座付住宅用手すり (ユニットバス用)


屋内 (浴室)



ユニットバスに後付け可能

■ 手すりの固定方法

ネジを締めると穴に差し込んであったプラスチックアンカーが作用し、壁を挟むようにして固定します。

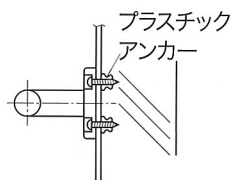

プラスチックアンカー

当社独自形状のプラスチックアンカーが壁の裏側でダンゴ状となりナットの機能を果たします。



下穴にプラスチックアンカーを差し込みます。



木ねじが食い込むと、らせん状に回転し始めます。




ダンゴ状になると取り付け完了です。


※壁裏の状況

■ 大きな台座でしっかり取り付け


手すりと一体になった大きな台座が広い範囲で壁に接するので薄いユニットバスの壁でも安心して使用できます。

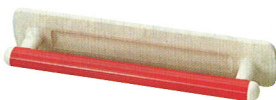

■ 手すりの形状・素材

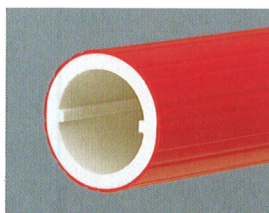

すべらず、しっかり握れる太さ・形状。直径34mm採用。

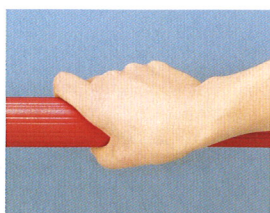


表面はソフトですべりにくい素材。




手すりの表面は衛生的な抗菌処理。


台座付住宅用手すり(ユニットバス用) UB-400

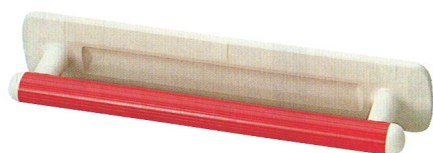

レッド

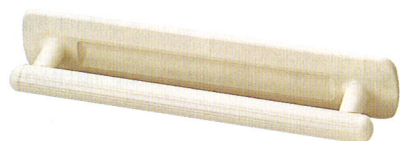

ホワイト

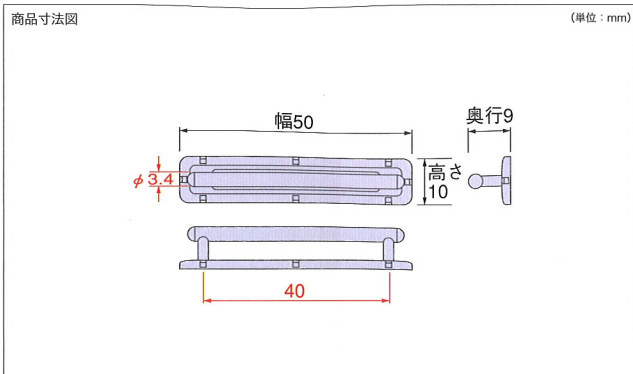

商品サイズ: 幅50×奥行9×高さ10cm

商品重量: 約0.9kg

材質: PVC

梱包入数: 2個

出荷単位: 2個

T A I S: 000086

CCTA 9 5: 181806


付属品: プラスチックアンカー×8/丸木ネジ×8/角座金×8/アロンアルファ

品名	色調	商品コード	JAN	価格
UB-400	ホワイト	535-300	030226	12,500円(税込 13,125円)
	レッド	535-307	030233	


台座付住宅用手すり(ユニットバス用) UB-600



レッド

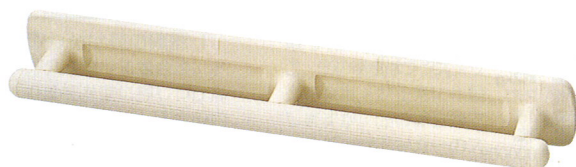

ホワイト

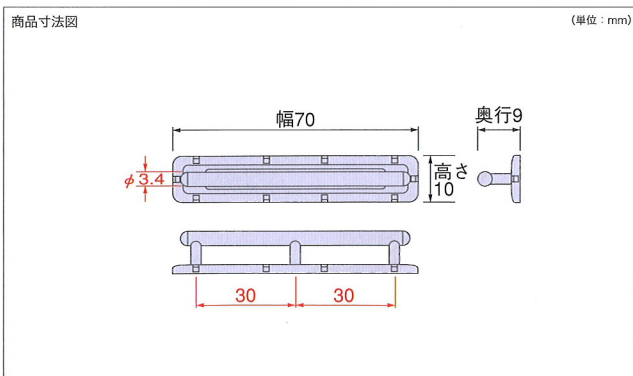

商品サイズ: 幅70×奥行9×高さ10cm

商品重量: 約1.2kg

材質: PVC

梱包入数: 2個

出荷単位: 2個

T A I S: 000087

CCTA 9 5: 181803

付属品: プラスチックアンカー×10/丸木ネジ×10/角座金×10/アロンアルファ



品名	色調	商品コード	JAN	価格
UB-600	ホワイト	535-310	030240	14,500円(税込 15,225円)
	レッド	535-317	030257	

Bath room

台座付住宅用手すり (ユニットバス用)

屋内 (浴室)

台座付住宅用手すり (ユニットバス用) UB-L

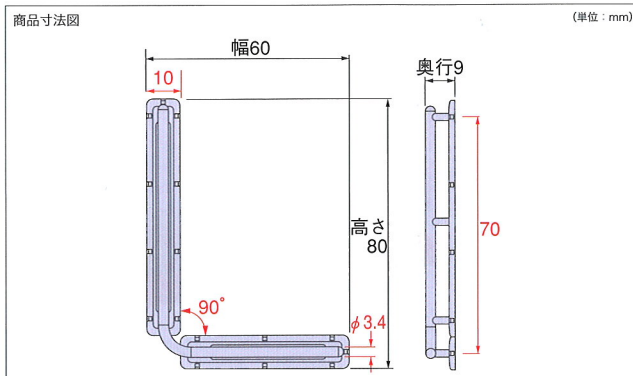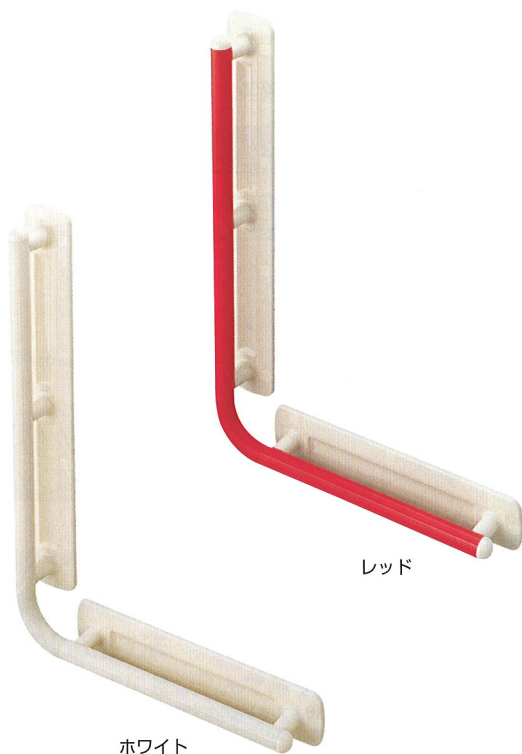

商品サイズ: 幅60×奥行9×高さ80cm

商品重量: 約2kg

材質: PVC

梱包入数: 1個

出荷単位: 1個

T A I S: 000088



CCTA 95: 181803

付属品: プラスチックアンカー×16/丸木ネジ×16/角座金×16/アロンアルファ L型レンチ

品名	色調	商品コード	JAN	価格
UB-L	ホワイト	535-320	030264	29,000円(税込30,450円)
	レッド	535-327	030271	

※組立て式

台座付住宅用手すり (ユニットバス用) UB-L45

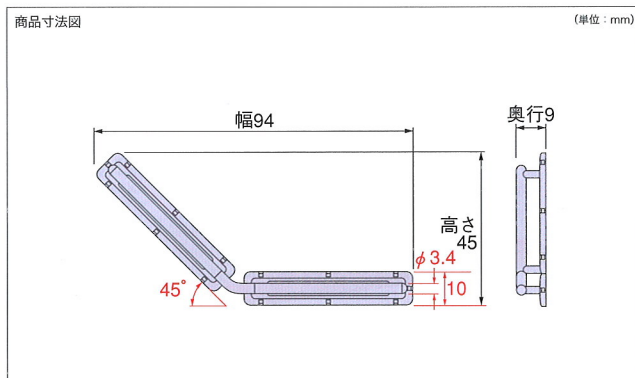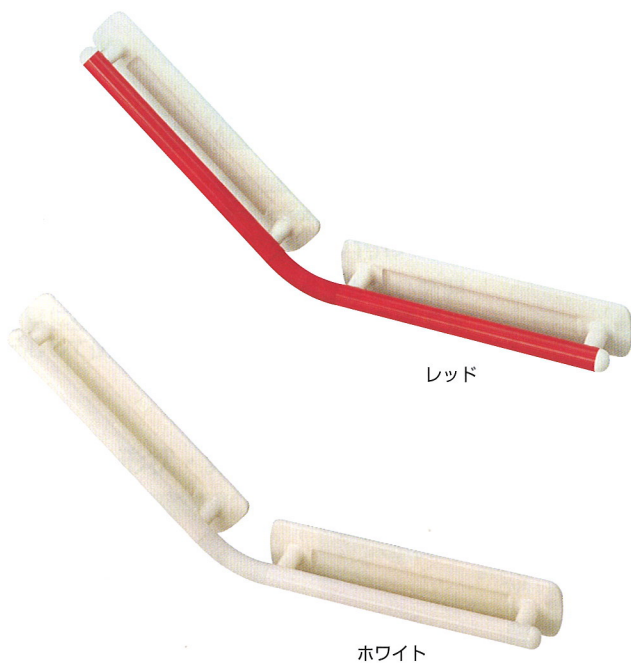

商品サイズ: 幅94×奥行9×高さ45cm

商品重量: 約2kg

材質: PVC

梱包入数: 1個

出荷単位: 1個

T A I S: 000089

CCTA 95: 181806

付属品: プラスチックアンカー×14/丸木ネジ×14/角座金×14/アロンアルファ L型レンチ

品名	色調	商品コード	JAN	価格
UB-L45	ホワイト	535-330	030363	24,500円(税込25,725円)
	レッド	535-337	030370	

※組立て式

台座付住宅用手すり【ユニットバス用】の取り付け方

壁を解体しなくても取り付けることができます。

※壁裏に柱のない薄いユニットバスの壁（4～12mm）に取り付けることができます。

壁パネルの条件

注意


- 手すりの変色、取り付け強度の低下をさけるため、「直射日光の当たる場所」「室温60℃以上になる場所（換気乾燥機・サウナ機能付）」「常時水に浸かる場所」「壁表面が平坦ではない場所」には取り付けしないでください。
- 磁石が付く壁には取り付け可能です。（ホーローを除く）

取り付け可能な壁（パネル）	取り付け不可能な壁（パネル）
■タイル（100角、200角、100×200） ■塩ビ鋼板複合 ■化粧鋼板 ■特殊化粧セメント板	■大判タイル（目地への取り付けが困難なため） ■FRP（壁裏にリブがありプラスチックアンカーが固定できないため） ■天然大理石（壁の強度が不足しているため） ■天然木（壁の強度が不足しているため） ■ホーロー（壁の強度が不足しているため）

※取り付け前に壁の材質等を確認し、施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。


取り付け方

■「タイル」に取り付ける場合

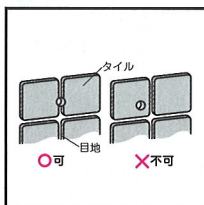


取り付け前の確認 1

下穴は目地を中心として開けてください。タイル上に下穴を開けた場合、タイルにひび割れが生じることもあります。

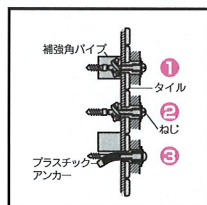


取り付け前の確認 2

①、②の場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、③の場合はプラスチックアンカーのスリットからねじがはずれ、所定の締め付け強度が得られません。

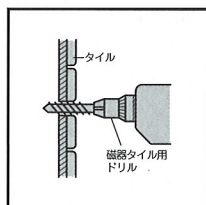


下穴の切削

下穴を磁器タイル用ドリルで開け、防水のために下穴が完全に隠れるまでコーキング剤を注入します。

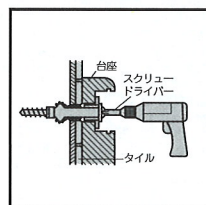

ねじの締め込み 1


下穴にプラスチックアンカーを差し込んだ後、そのねじ穴内部にもコーキング剤を注入し、そこにねじを締め込みます。

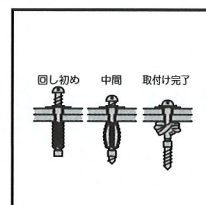

ねじの締め込み 2


ねじを締めるにつれプラスチックアンカーの壁裏部分が広がり、壁を挟み込むように固定します。※プラスチックアンカーは、専用品のため、市販のものは使用しないでください。

■「塩ビ鋼板複合」、「化粧鋼板」、「特殊化粧セメント板」に取り付ける場合

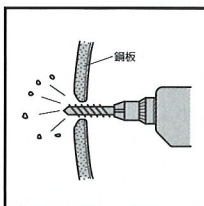


取り付け前の確認 1

下穴を開ける場合は、ドリル先を壁に押しつけしないでください。下穴の内側がすり鉢状になり、うまく固定が出来ません。

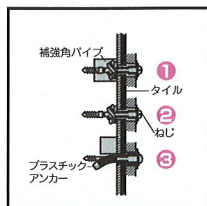


取り付け前の確認 2

①、②の場合はプラスチックアンカーが正常に作動しますが、③の場合はプラスチックアンカーのスリットからねじがはずれ、所定の締め付け強度が得られません。

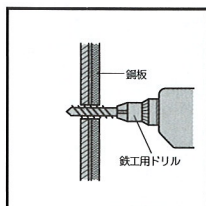


下穴の切削

下穴を鉄工用ドリルで開け、穴内側に木工用アロンアルファを塗った上で、防水のために下穴が完全に隠れるまでコーキング剤を注入します。

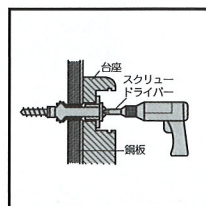

ねじの締め込み 1

下穴にプラスチックアンカーを差し込んだ後、そのねじ穴内部にもコーキング剤を注入し、そこにねじを締め込みます。

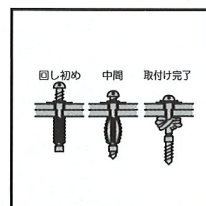

ねじの締め込み 2

ねじを締めるにつれプラスチックアンカーの壁裏部分が広がり、壁を挟み込むように固定します。※プラスチックアンカーは、専用品のため、市販のものは使用しないでください。

※市販のコーキング剤を別途準備してください。

※詳しい取り付け方については、製品に付属の施工説明書をよく読んでから施工を行ってください。